

**DMC** 

**TQC** 

*Hỗn hợp rửa mũi*

**DOPACOOOL** 

**THÀNH PHẦN:** Mỗi gói 2,375 g chứa:

- Natri clorid ..... 2,25 g
- Natri bicarbonat ..... 125 mg

**CÔNG DỤNG:** Dùng pha dung dịch rửa mũi trong các trường hợp:

- Khô mũi, ngứa mũi, chảy nước mũi.
- Các triệu chứng ở mũi do cảm lạnh, cảm cúm.
- Các kích ứng ở mũi do khói, bụi nhà, lông động vật, phấn hoa, ô nhiễm môi trường.
- Dùng vệ sinh mũi hàng ngày để làm sạch và giữ ẩm niêm mạc mũi.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- **Bước 1:** Chuẩn bị bình rửa mũi 250 ml. Rửa tay, cho nước sạch (nước tinh khiết, nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội hoặc ấm (37 °C)) vào bình đến vạch 250 ml. Đổ 1 gói hỗn hợp rửa mũi vào bình. Vặn nắp chặt vừa phải. Lắc đều để hòa tan.
- **Bước 2:** Đứng thẳng, đầu hướng xuống bốn rửa, miệng há nhẹ, chỉ thở bằng miệng, không thở bằng mũi. Đặt khít đầu bình vào một bên mũi, bóp

giữ bình để cho dung dịch chảy từ bình vào lỗ mũi bên này rồi chảy ra ở lỗ mũi bên kia đến khi hết nửa bình. Xi mũi thật nhẹ nhàng để loại bỏ dung dịch trong mũi. Lặp lại động tác cho bên mũi còn lại.

- **Bước 3:** Rửa sạch và làm khô bình và nắp bình sau khi sử dụng.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không sử dụng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:**

- Không sử dụng nước thông thường để pha.
- Sử dụng theo đúng hướng dẫn.
- Không dùng chung bình rửa mũi với người khác.
- Rửa bình thật sạch sau mỗi lần sử dụng.
- Trẻ em phải có người lớn hướng dẫn khi sử dụng.
- Thay thế bình rửa mũi sau khi sử dụng 3 tháng.

**BẢO QUẢN:** Ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

**CHỦ SỞ HỮU:**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

**Sản xuất tại:** Cụm Công nghiệp Cẩn Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

**DOMESCO**

(Đạt chứng nhận **ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016**)

Điện thoại: 1800.969.660

**Xuất xứ:** Việt Nam

Website: [www.domesco.com](http://www.domesco.com)